

SKIN**things**®

CLEARING Treatment

Porenverfeinerung, Klärung und Beruhigung für wintermüde und zu Unreinheiten oder Rötungen neigende Haut durch eine neue Kombinationsbehandlung: die SKIN**things**® **CST Zell-Stimulations-Technik** eingebunden in ein neues Treatment.



VORBEREITUNG:

Befreien Sie die Haut von abgestorbenen Hornschüppchen mit einem SKIN**things**® Säurepeelings z.B. dem **ANTI-PIGMENT PEEL** oder auch dem **ANTI-AGING PEEL**. Alternativ empfehlen wir den SKIN**things**® **FACE SCRUB STICK**.

SKIN**things**® CST ZELL-STIMULATIONS-TECHNIK:

Benötigt werden der **SKIN REFINER** *cos* oder **SKIN REFINER** *home* sowie von SKIN**things**® eigens für diese Methode entwickelte Stimulationsaufsätze.

Anwendung:

- Stimulationsaufsätze in den **SKIN REFINER** *cos* bzw. *home* eindrehen
- Gerät einschalten, hohe Intensität
- Geschwindigkeit nach Hautsensibilität einstellen (wir empfehlen die höchste Stufe)
- SKIN**things**® **CONCENTRATE PURIFYING & CLEARING** partienweise großzügig auftragen
- Produkt in kleinen kreisenden Bewegungen einarbeiten

OPTIONAL: PHOTONENLICHT

Setzen Sie das Photonenlicht des **SKIN REFINER NANO 2.0** ein um eventuelle Unreinheiten und Rötungen noch schneller abklingen zu lassen.

ABSCHLUSS UND PFLEGE:

Mischen Sie den SKIN**things**® **PAPAYA POWDER** wie angegeben mit dem SKIN**things**® **PAPAYA LIQUID**. Rühren Sie die Mischung zügig an und tragen Sie sie mindestens messerrücken-dick auf das behandelte Hautareal auf. Einwirkzeit 10-15 Minuten. Nehmen Sie die Maske in einem Zug ab, eventuelle Reste mit einem feuchten Tuch nachreinigen, nicht abwaschen.

Zuletzt nochmals einige Tropfen SKIN**things**® **CONCENTRATE PURIFYING & CLEARING** in die Haut einklopfen und mit der SKIN**things**® **SUN CREAM** (LSF 30) versiegeln und gleichzeitig vor schädlicher UV-Strahlung schützen. Die Behandlung kann wöchentlich durchgeführt werden.

ERGEBNIS:

Sanfte Enzyme und beruhigende maritime Wirkstoffe lindern Juckreiz, beruhigen Irritationen und lassen Rötungen und eventuelle Unreinheiten abklingen.